

# STRATOPRESS

Forno universale a  
compressione e di cottura



Grazie all'uso di materiali di alta qualità protetti da una struttura in acciaio lo StratoPress è decisamente un forno affidabile. Per questo concediamo 2 anni di garanzia.



## Multifunzionale

Lo StratoPress può essere utilizzato sia come forno di cottura per ceramica che come forno a compressione. Il forno a compressione è estremamente versatile e provvisto di una serie di programmi standard impostati per gli specifici parametri Carrara Press. Nel rispetto dei parametri preimpostati, il forno può essere programmato a discrezione del tecnico, sia per le lavorazioni a compressione che per quelle che richiedono la cottura. Le due schede in dotazione contengono tutti i programmi standard di Elephant che permettono l'uso immediato del forno. Inoltre è disponibile una funzione di memorizzazione dei programmi personali.

## Qualità garantita

Al pari del forno StratoPlus, lo StratoPress è stato realizzato con materiali di alta qualità. La spirale di quarzo con un elemento di riscaldamento integrato provvede ad una distribuzione uniforme del calore durante la cottura. Grazie al raffreddamento rapido del forno dopo ogni programma di cottura, si può ottenere un elevato livello di produttività. I risultati della cottura sono sempre di ottima qualità.



La ceramica Carrara Press fa parte del sistema Carrara, uno dei primi e migliori sistemi odontotecnici al mondo. Una sola ceramica da cottura adatta a tutte le indicazioni.



## Sintonia ideale


Lo StratoPress è predisposto per tutti i componenti del sistema Carrara Press. In questo modo si è realizzata una sintonia ottimale fra i pellet, il rivestimento, il plunger di Carrara Press ed il forno.

Elephant



dental health products

Let's share  
dental care

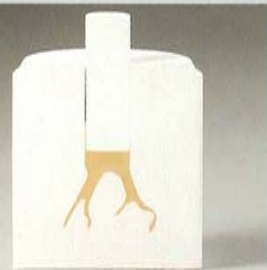

# STRATOPRESS

Forno universale a compressione e di cottura

Massima praticità

Un display azzurro ordinato e chiaro. Programmazione semplice. Wheel & Push o comando tramite tasti di funzione. Visualizzazione del programma in forma di testo o di grafico. Ad ogni singolo programma può essere attribuito un nome.



#### Funzioni di cottura:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Numero di programmi di cottura                  | 100                          |
| Posizioni di pre-essiccazione muffola           | 0 - 9 posizioni (0 = chiuso) |
| Tempo di pre-essiccazione                       | 00:00 - 59:59 min            |
| Tempo di chiusura muffola                       | 00:00 - 59:59 min            |
| Temperatura iniziale                            | 100 - 800                    |
| Tempo di pre-essiccazione con muffola chiusa    | 00:00 - 59:59 min            |
| Aumento graduale                                | 1 - 200°C/min                |
| Temperatura finale                              | 800 - 1200°C (per 1°C)       |
| Temperatura iniziale vuoto                      | 100 - 1200°C (per 1°C)       |
| Tempo di cottura alla temp. finale con vuoto    | 00:00 - 59:59 min            |
| Tempo di cottura alla temp. finale senza vuoto  | 00:00 - 59:59 min            |
| Campo di indurimento                            | 100 - 1200°C (per 1°C)       |
| Tempo di indurimento                            | 00:00 - 59:59 min            |
| Tempo di apertura della muffola dopo la cottura | 00:00 - 59:59 min            |

#### Funzioni di compressione:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Temperatura iniziale                     | 400 - 800°C            |
| Temperatura finale                       | 800 - 1200°C (per 1°C) |
| Aumento graduale                         | 1 - 200°C/min          |
| Tempo di cottura alla temperatura finale | 00:00 - 59:59 min      |
| Tempo di compressione                    | 00:00 - 59:59 min      |

#### Dati generali:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Visualizzazione del programma | Possibilità di indicazione alfanumerica  |
| Display                       | Azzurro  |
| Funzione scheda di memoria    | Chip con programmi standard per la ceramica Elephant<br>Scheda Back-up per le impostazioni personali |
| Collegamento stampantz        | Seriale 9 pin RS232  |

#### Dati elettrici:

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Valori di collegamento          | 50/60Hz 230V o<br>50/60Hz 100-120V |
| Potenza massima di collegamento | 1440W                              |
| Watt necessari in continuo      | per 1000°C<br>400W                 |

#### Dimensioni:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Altezza/Larghezza/Profondità      |             |
| Con muffola aperta                | Cm 60/33/46 |
| Con muffola chiusa                | Cm 45/33/42 |
| Piatto forno                      | Ø cm 10     |
| Altezza muffola                   | Cm 6,35     |
| Altezza dell'elemento riscaldante | Cm 3,8      |
| Peso del forno/imballo            | Kg 25/30    |



#### Fattori ambientali:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| A temperatura ambiente | Fra 5 - 40°C         |
| Umidità relativa       | 80% (non condensata) |

#### Accessori:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Anello di posizionamento                | 1                           |
| Scheda a chip (programmi di cottura)    | 1 (Antagon)                 |
| Scheda a chip (program. di cottura)     | 1 (Carrara)                 |
| Scheda a chip (back-up)                 | 1 (per programmi personali) |
| Pompa a membrana/a vuoto                | Maxvac                      |
| Filtro di pressione - Piatto di cottura | 1                           |
| tubo aria compressa e raccordi          | 1 set                       |
| Cavo di alimentazione e fusibili        | 1                           |
| Manuale                                 | 1                           |

ISO  
9001

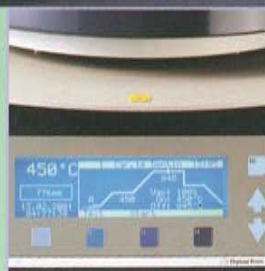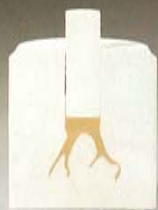

Due piatti girevoli ed estraibili verso l'esterno.



Elephant



dental health products

Noi lavoriamo al vostro successo

Elephant Dental B.V.  
Hoorn, Paesi Bassi  
Tel. int. +31 229 25 90 00  
Fax int. +31 229 25 90 99  
E-mail info@elephant.nl  
Internet www.elephant-dental.com



KCA 060 IV  
Date: 0111