

Gebrauchsanleitung für APOLLO 4 H

- 1. Indikation.** Sattgelbe dental Legierung für Inlays, Kronen, Brücken, Teleskoptechnik und Modellguß.
- 2. Kontraindikation.** Nicht verwenden wenn eine Allergie gegen einen der Bestandteile bekannt ist.
- 3. Gußstifte.** Gußstifte nach der indirekten Methode: 3 mm \varnothing für Kronen, 3,5 mm \varnothing für Zwischenglieder, 4-4,5 mm \varnothing für Querbalken.
- 4. Einbetten.** Einbetten mit bewährten Phosphat-Einbettmassen, z.B. Carrara Universal DL Investment.
- 5. Vorwärmen.** Vorwärmen bei 700°C für 30 bis 120 Minuten, je nach Gußringgröße.
- 6. Gießen.** Gießtemperatur: 1070°C im Graphittiegel; oder mit der Flamme im Keramiktiegel mit Elephant Proflux. Bei jedem Guß mindestens 1/3 Neumetall verwenden. Das Metall vor der Wiederverwendung gründlich reinigen, z.B. durch Sand- und Dampfstrahlen.
- 7. Ausarbeiten.** Ausarbeiten wie gewohnt mit den normalen Ausarbeitungsinstrumenten und -materialien, wie Elephant Alublast, Bright Blast und Poliermaterialien.
- 8. Löten.** Elephant II (PdF) 800°C oder III (PdF) 750°C mit Elephant Paste Flux.

APOLLO 4 H

25
GRAM

Made in Germany

Sattgelbe dental Goldgußlegierung
Rich yellow dental gold casting alloy
Diepgele dentale goud gietlegering

Typ IV für Inlays, Kronen, Brücken, Teleskoptechnik & Modellguß
Type IV for inlays, crowns, bridges, telescopic technique & partial dentures
Type IV voor inlays, kronen, bruggen, telescoop techniek & partiële prothesen

Au=66.5, Pd=1.0, Ag=14.7, Pt=8.0, Cu=9.2, Rest Sn, Zn, Ir
Schmelzintervall, M.R. 900-990°C
Dichte, S.G. 15.5 g/cm³
Vickershärte, HV5 280 (Nach dem Guß, as cast)
Bruchdehnung, Elong. 11% (Nach dem Guß, as cast)
Rp-0.2 790 MPa (Nach dem Guß, as cast)
E-Modul 98 GPa

www.elephant-dental.com
REF 540106090

ISO 22674
Rx only



Elephant Dental B.V.

Verlengde Lageweg 10, 1628 PM HOORN, The Netherlands

LOT

CE
O344