



1 *paste opaque appliquée*



2 Application de l'opaque dentin



3 *dentin réduite (cutback)*

Construction individuelle Sakura Interaction




4 *action i-dentin insérée*



5 Application des différentes *x-tra incisals*



6 *Cadre incisal*

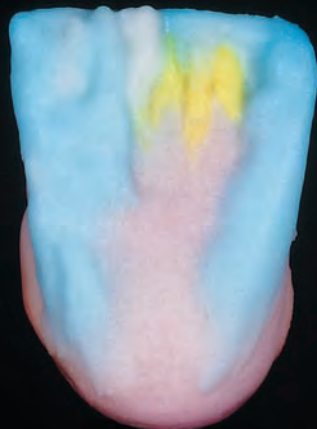

7 *Couches incisales alternées*



8 *Finition avec incisal*



9 *Recouvrement palatin*

StratoPlus/StratoPress

(Protocole général de cuisson)

		Opaque pâte	1. Dentine	2. Dentine	Brillant
Température de préchauffage ou initiale	(°C)	400	450	450	450
Temps de préséchage et de préchauffage	(min)	7	5	4	4
Élévation de température	(°C/min)	60	60	60	60
Température finale	(°C)	920	850	845	810
Durée de maintien sous vide	(min)	1	1	1	
Durée de maintien sans vide	(min)	1	1	1	1,5
Début du vide	(°C)	400	450	450	-
Fin du vide	(°C)	920	850	845	-

Remarque importante:



Les températures de cuisson ne sont que des valeurs indicatives. Chaque four étant différent, il est possible que des températures différentes doivent être appliquées.

Choix d'armature (indication):

Sakura Interaction est une céramique à faible coefficient d'expansion, à faible température de fusion, destinée à la cuisson d'armatures en oxyde de zirconium. Sakura Interaction peut se cuire simplement sur des armatures en oxyde de zirconium dans une plage de coefficient d'expansion thermique de 10,0 et 10,6 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ (25 - 500°C).

Contre-indication:

Ne pas utiliser en cas d'allergie à un des constituants d'alliage.

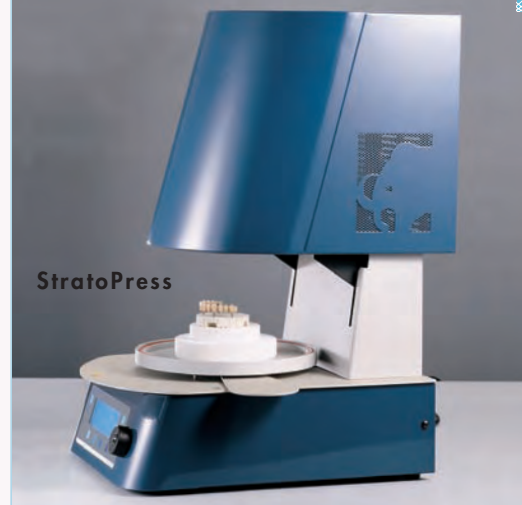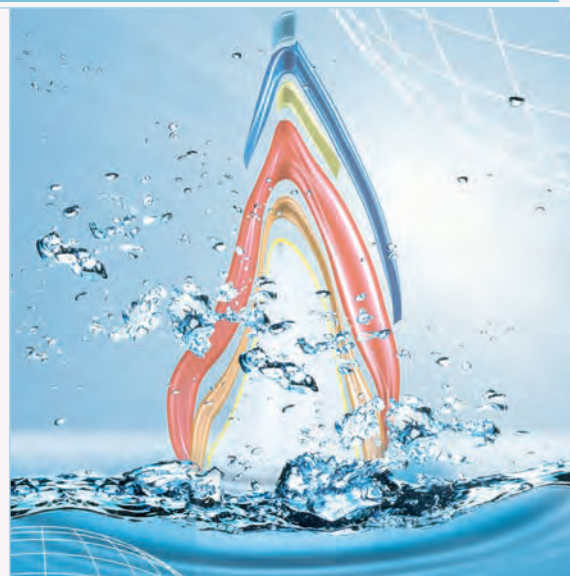

StratoPress

Traitement préalable de l'armature:

Pour le traitement préalable des armatures, vous devez suivre les indications figurant dans le manuel du fabricant.

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2	3A4			1B2	3B4		1C2	3C4		1A2	1B2	1C2			
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59	60	59	60	59			

Type 1 céramique dentaire Made in Holland ISO 6872

CE 0344 01-mar-2005

Elephant



dental health products