



1 Aangebracht *paste opaque*



2 Aanbrengen van *opaque dentin*



3 Gereduceerd *dentin* (cutback)

Individuele laagopbouw van Antagon Interaction op normaalsmeltende legering



4 Aangebracht *action i-dentin*



5 Aanbrengen van verschillende *x-tra incisals*



6 Omlijsting met *incisal*



7 Incisale "sandwich"-opbouw



8 Volledig opgebouwd met *incisal*



9 Voltooid, geglanze kroon

StratoPlus (Algemeen bakprogramma)	1e Pasta- opaker	2e Pasta- opaker	Schouder- massa	1e dentine	2e dentine	Glans	Correctie massa	
Voorverwarm- resp. starttemperatuur	(°C)	400	400	500	500	500	500	-
Voordroog- en voorverwarmtijd	(min)	7	7	4	5-7	3-5	4	-
Oploop- snelheid	(°C/min)	60	60	60	60	60	60	-
Eindtemperatuur	(°C)	915	910	895	895	890	885	-
Houdtijd	(min)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	-
Vacuümstart	(°C)	400	400	500	500	500	-	-
Vacuümeind	(°C)	915	910	895	895	890	-	-



StratoPlus


Keuze opbaklegering:

Antagon Interaction kan probleemloos op opbaklegeringen in een WAK-bereik (thermische expansie-coëfficiënt) van 13,8 tot 14,9 $\mu\text{m}/\text{mK}$ (20-500°C) worden gebakken.

Snelle afkoeling tot 14,0 $\mu\text{m}/\text{mK}$ – 0 min.

Normale afkoeling tot 14,3 $\mu\text{m}/\text{mK}$ – max. 2 min.

Langzame afkoeling vanaf 14,4 $\mu\text{m}/\text{mK}$ – 5-7 min.

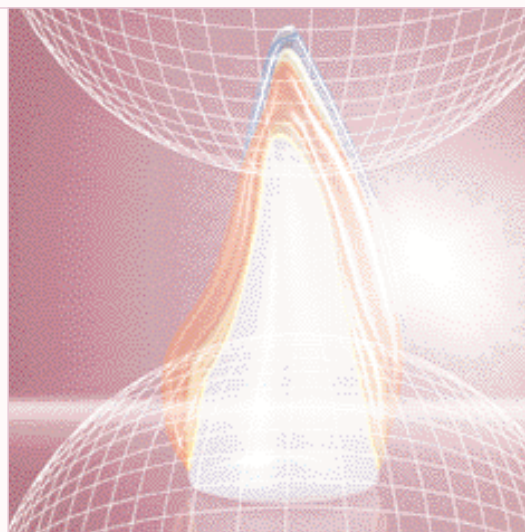

Belangrijke opmerking:

De opgegeven baktemperaturen zijn richtwaarden. De temperaturen kunnen per keramiekoven verschillen en moeten eventueel worden aangepast.

Afkoelfase:

- *BioGold Plus: Elke bakfase moet normaal tot langzaam worden afgekoeld (2-5 min.).*
- *Bermudent Y: Elke bakfase moet normaal tot langzaam worden afgekoeld (2-5 min.).*
- *Bermudent H: Elke bakfase moet snel worden afgekoeld (0 min.).*
- *Orion WX: Elke bakfase moet snel worden afgekoeld (0 min.).*
- *Orion Argos: Elke bakfase moet langzaam worden afgekoeld (5-7 min.).*

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2	3A4	1B2	3B4	1C2	3C4	1A2	1B2	1C2							
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60	59	

i De medewerkers van onze afdeling Technical Support geven u graag advies over welk bakprogramma voor uw keramiekoven het meest geschikt is.

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10 1628 PM Hoorne
Tel: +31 (0) 229 25 90 00
Fax: +31 (0) 229 25 90 99
E-mail: export@elephant.nl
Internet:
www.elephant-dental.com

Elephant

CE 0344 01.09.03

dental health products