



1 Aangebrachte *paste opaque*



2 Aanbrengen van *opaque dentin*



3 Gereduceerde *dentin* (cutback)

Individuele laagopbouw Sakura Interaction




4 Aangebracht *action i-dentin*



5 Aanbrengen van verschillende *x-tra incisals*



6 Omlijsting met *incisal*

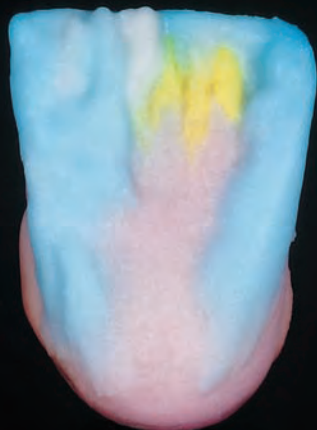

7 Incisale "sandwich"-opbouw




8 Volledig opgebouwd met *incisal*



9 Palatinale opbouw

StratoPlus/StratoPress (algemeen bakprogramma)		Pasta opaker	1e Dentine	2e Dentine	Glanzen
Voorverwarm- resp. starttemperatuur	(°C)	400	450	450	450
Voordroog- en voorverwarmtijd	(min)	7	5	4	4
Oploopsnelheid	(°C/min)	60	60	60	60
Eindtemperatuur	(°C)	920	850	845	810
Houdtijd met vacuüm	(min)	1	1	1	
Houdtijd zonder vacuüm	(min)	1	1	1	1,5
Vacuüm starttemperatuur	(°C)	400	450	450	-
Vacuüm eindtemperatuur	(°C)	920	850	845	-

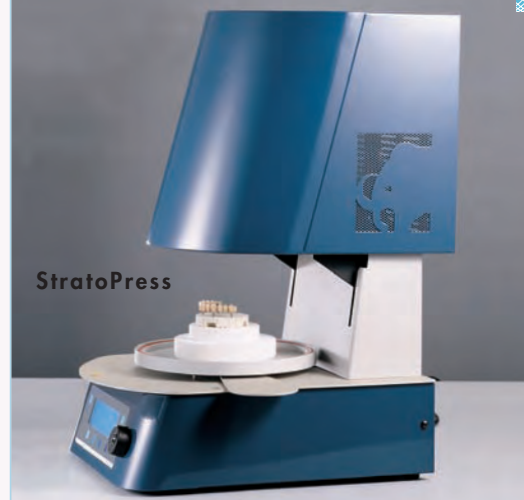

Belangrijk:


De opgegeven baktemperaturen zijn richtwaarden. De temperaturen kunnen per keramiekoven verschillen en moeten bijgevolg eventueel worden aangepast.

Keuze onderstructuur (indicatie):

Sakura Interaction is een laagexpanderende, laagsmeltende keramiek voor het opbakken van zirconoxide onderstructuren. Sakura Interaction kan eenvoudig opgebakken worden op zirconoxide onderstructuren met een thermische expansie coëfficiënt van 10,0 tot 10,6 µm/m.K (25-500°C).

Contra-indicatie:

Niet gebruiken indien een allergie voor een van de bestanddelen bekend is.

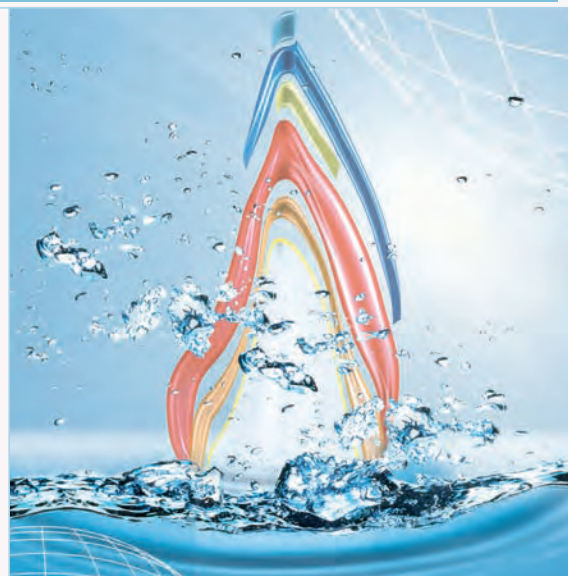

Vorbewerking onderstructuur:

Voor de voorbereiding van de onderstructuren dient u de aanwijzingen in de handleiding van de fabrikant in acht te nemen.

paste opaque	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
action i-dentin	1A2		3A4			1B2		3B4		1C2		3C4		1A2	1B2	1C2
x-tra incisal	x-tra i blue/x-tra i red/x-tra i grey/x-tra i orange/x-tra i clear															
	x-tra i bright/x-tra i medium/x-tra i dark															
incisal	58	59	60	57	59	60	59	60	59	60	59	60	59	60	59	

Type 1 dentaal keramiek Made in Holland ISO 6872

CE 0336 01-mar-2005

Elephant



dental health products