



Disponibles en los siguientes colores:
margin 1A2, 3A4, 1B2, 3B4, 1C2, 3C4 y Booster
margin correction Bright, Medium y Dark

Instrucciones para el uso de las masas de hombros.

Estas instrucciones se refieren al uso de las masas de hombros correspondientes a la cerámica Sakura Interaction. Para más información sobre cómo procesar las masas standard Sakura Interaction véanse las instrucciones de uso de Sakura Interaction.

Indicaciones: Sakura Interaction *margin* se ha desarrollado para la cocción de hombros cerámicos sobre subestructuras de óxido de circonio. Para ello es indispensable una preparación de hombro o en chamfer. Contraindicaciones: Todos los demás tipos de preparaciones. Sakura Interaction *margin* sólo se puede utilizar sobre subestructuras de óxido de circonio con un coeficiente de expansión térmica de 10,0 a 10,6 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ (25-500°C). Sólo para aplicaciones dentales, Rx only, Tipo 1 cerámica dental.



1 Sellar el muñón

1 Sellar el muñón:

- Aplique un endurecedor de yeso al muñón y permita que se seque bien.



2 Aislar el muñón

2 Aislar el muñón:

- Aplique un aislador de cerámica sobre el muñón y séquelo con aire comprimido.



3a Aplicar margin

3 Aplicar *margin* para la primera cocción de la masa de hombros:

- Mezcle el *margin* que proceda (véase la tabla de colores en la página anterior) con *margin liquid* hasta lograr una consistencia cremosa.
- Aplique la masa *margin* de la manera habitual. Condénsela bien y, de así desearlo, séquela con un secador antes de proseguir.



3b Secar con secador



4 Separar la estructura

4 Separar la estructura:

- Separe la estructura del muñón.
- Cueza la cerámica según el programa de cocción.

4 Programa para la primera cocción de la masa de hombros:

Secado	Temp. inicial	Temp. inicial vacío	Vel. de calentamiento
8-10 min.	450°C	450°C	55-80°C/min.
Temp. final	Tiempo de cocción		Aspecto
890°C	1 min.con vacío		Brillo mate

Color	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
<i>margin</i>	1A2		3A4	50% 3A4 & 50% Booster	Booster	1B2		3B4	50% 3B4 & 50% Booster	1C2		3C4	50% 3C4 & 50% Booster	1A2	3A4	3C4
<i>margin correction</i>	Bright, Medium & Dark															



5 El-hombro después la cocción

5 Aplicar *margin* para la segunda cocción de la masa de hombros:

- Mezcle el *margin* que proceda con *margin liquid* hasta lograr una consistencia cremosa.
- Aplique la masa *margin* de la manera habitual. Condénsela bien y, de así desearlo, séquela con un secador antes de proseguir.
- Separe la estructura del muñón.
- Cueza la cerámica según el programa de cocción.

5 Programa para la segunda cocción de la masa de hombros:

Secado	Temp. inicial	Temp. inicial vacío	Vel. de calentamiento
8-10 min.	450°C	450°C	55-80°C/min.
Temp. final	Tiempo de cocción		Aspecto
890°C	1 min.con vacío		Brillo mate

Importante:

Las temperaturas de cocción mencionadas son valores indicativos que pueden variar dependiendo del horno utilizado. Por lo tanto, es posible que sea necesario adaptar dichas temperaturas.

