



Proporción de mezcla

Revestimiento Carrara Universal Dustless

Esta lista se ha elaborado con el fin de facilitar el primer uso del revestimiento Carrara Universal Dustless*. Datos sin compromiso para los procedimientos rápidos con mufas metálicas. Datos indicativos tanto para las diversas aplicaciones de los distintos grupos de aleaciones como para el procedimiento con Carrara Press y Volumia. Para lograr un resultado óptimo es importante atenerse a las siguientes instrucciones.

* Para el procedimiento exacto, consúltese el manual de empleo de Carrara Universal Dustless.

Aleaciones con un alto contenido en oro

BioGold Plus, Bermudent H, Bermudent Y, Orion GX, Orion UX, Orion UX Plus, Orion UWX, Carrara PdF, Cera H, Cera R Plus, Cera F, Apollo IST, Apollo 3, Apollo 3 PdF, Apollo 4, Apollo 4PdF, Apollo 4CF, Pluto 3, Pluto 4, Minerva 58, BioGold AN, Biolife 4, Biolife PCF, Apollo 4H.

Aleaciones con bajo contenido en oro

Orion WX, Minerva 4PdF, Minerva 4CF, Mirafort 4CF, Orion E, Cera Aurum.

Aleaciones de paladio + plata-paladio

Orion Vesta, Orion Argos, Pallacon, Pallium 3C, Pallium 3, Cera E, Orion Isis Plus.

Aleaciones no nobles

Vi-Comp, Vi-Comp LFC.



Colar	Tamaño de la mufa		Investment Liquid ml	Agua destilada ml	Investment Liquid ml	Agua destilada ml	Investment Liquid ml	Agua destilada ml	Liner de la mufa	Observación:
Inlays implantes	1 x 60 g /	14,4 ml	6,5	7,9	7,2	7,2	8,6	5,8	1 x Olympos Liner	Todos los datos son especificaciones del fabricante. Los valores obtenidos en la práctica se basan principalmente en el uso de una mufa metálica con Elephant Olympos Liner. Las condiciones de uso distintas, el empleo en otro lugar o el uso de formas individuales requieren proporciones de mezcla específicas.
	3 x 150 g /	36,0 ml	16,2	19,8	18,0	18,0	21,6	14,4	1 x Olympos Liner	
	6 x 300 g /	72,0 ml	32,4	39,6	36,0	36,0	43,2	28,8	1-2 x Olympos Liner	
	9 x 450 g /	108,0 ml	48,6	59,4	54,0	54,0	64,8	43,2	2 x Olympos Liner	
			= 45 %	55 %	= 50 %	50 %	= 60 %	40 %		
Coronas, puentes	1 x 60 g /	14,4 ml	7,2	7,2	7,9	6,5	9,4	5,0	1 x Olympos Liner	
Coronas cónicas *	3 x 150 g /	36,0 ml	18,0	18,0	19,8	16,2	23,4	12,6	1 x Olympos Liner	
Onlays	6 x 300 g /	72,0 ml	36,0	36,0	39,6	32,4	46,8	25,2	1-2 x Olympos Liner	
*(primarias)	9 x 450 g /	108,0 ml	54,0	54,0	59,4	48,6	70,2	37,8	2 x Olympos Liner	
		= 50 %	50 %	= 55 %	45 %	= 65 %	35 %			
Coronas telescópicas	1 x 60 g /	14,4 ml	5,8	8,6	6,5	7,9	7,9	6,5	1 x Olympos Liner	
(secundarias)	3 x 150 g /	36,0 ml	14,4	21,6	16,2	19,8	19,8	16,2	1 x Olympos Liner	
	6 x 300 g /	72,0 ml	28,8	43,2	32,4	39,6	39,6	32,4	1-2 x Olympos Liner	
	9 x 450 g /	108,0 ml	43,2	64,8	48,6	59,4	59,4	48,6	2 x Olympos Liner	
		= 40 %	60 %	= 45 %	55 %	= 55 %	45 %			

Prensar	Datos para Carrara Press		
	Horno de inyección	Investment Liquid ml	Agua destilada ml
Coronas, Inlays Veneers	100 g / 24 ml	12,0 (50%)	12,0 (50%)
	200 g / 48 ml	24,0 (50%)	24,0 (50%)
MOD-Inlay	100 g / 24 ml	14,4 (60%)	9,6 (40%)
	200 g / 48 ml	28,8 (60%)	19,2 (40%)

Observación: Para más información sobre el prensado con el horno de compresión, consulte la guía azul 'paso a paso' para los hornos de compresión.

Forma de envase	Forma de envase	
	No. art.:	Forma de envase
	232976050	6 kg / 40 sobres de 150 g
	232978050	6 kg / 60 sobres de 100 g
	232980050	6 kg / 100 sobres de 60 g
	232982050	6 kg / el cubo
	233522050	1 l Investment Liquid

Recubrir	Datos para Carrara en Sakura Volumia		
	Tamaño de la mufa	Investment Liquid ml	Agua destilada ml
Corone	100 g/24 ml	12,0 (50%)	12,0 (50%)
Corone & Ponti	200 g/48 ml	24,0 (50%)	24,0 (50%)

Observación: Para más información sobre el prensado con Carrara & Sakura Volumia, lea las instrucciones de uso correspondientes.

Elephant



dental health products

Nosotros apoyamos su éxito.

Elephant Dental B.V.

Verlengde Lageweg 10

1628 PM Hoorn, Holanda

Tel: +31 229 25 90 00

Fax: +31 229 25 90 99

E-mail: export@elephant.nl

www.elephant-dental.com